

Zártkanalas /indirekt/ lenyomatvételi technika lépései

Indirekt zártkanalas lenyomatvételi módszert akkor alkalmazunk, ha a beültetett implantátumok egymáshoz képest csak kisfokú / maximum 9-10° / szögeltérést mutatnak.

Elsősorban részleges foghiányok esetén javasolható ez a lenyomatvételi módszer.

A lenyomat készítéséhez A-szilikon vagy poliészter alapanyagú lenyomatvételi anyag használata ajánlott.

Lenyomatvételhez kemény műanyagból készített gyári vagy egyéni kanalat használjunk.

Lehetőleg egyszakaszos vagy egyidejű kétszakaszos lenyomatvételi módszert alkalmazzunk.

A lenyomatvétel lépései:




1. lépés: a száj előkészítése lenyomatvételhez

Az implantátum felszabadítása /második műtét/ után 1 hétig a páciens ínyformázót visel, mely biztosítja a periimplantáris gingiva megfelelő formázását. Ez a módszer elsősorban a kétszakaszos műtéti módszerrel beültetett implantátumok esetében javasolt eljárás. Amennyiben egyszakaszos műtéti módszert alkalmazzunk, ínyformázásra nincs szükség.



2. lépés: lenyomatvétel

A gingiva regenerációja után /kb. 7-10 nap/ az ínyformázó/ka/t eltávolítjuk az implantátum/ok/ból és helyére behelyezzük a lenyomatvételi műcsonko/ka/t, melyet az implantátumba átmenő rögzítő csarral fixálunk.

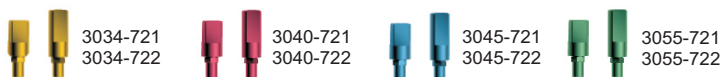

3. lépés

A lenyomatanyaggal megtöltött kanalat a szájba helyezzük.



4. lépés

A megkötött lenyomatot eltávolítjuk a szájból, majd a lenyomatvételi műcsonkokat egyesével kicsavarozzuk az implantátumokból. Ezek után az ínyformázókat vagy transzgingivális gyógyulási csavarokat visszahelyezzük a szájba lévő implantátumokba, zárjuk az implantátumokat.



5. lépés

A minta begipszselése előtt a szájból eltávolított lenyomatvételi műcsonkokat a laborimplantátumokkal az átmenő csavarral összerögzítjük. Az így összerögzített lenyomatvételi műcsonk-technikai implantátum egységet gondosan vissza kell illeszteni a lenyomatba. Ez történhet a rendelőben, de a fogtechnikai laboratóriumban is.

Ezután a munkamenet megegyezik a fogorvosi gyakorlatban a fogpótlások készítésekor alkalmazott munkamenettel.

A lenyomatvétel lépései nem függenek a fogpótlás típusától. A zártkanalas lenyomatvételi technika a megfelelő lehet bármilyen implantátumos fogpótlás /cementezéssel, - csavarral rögzülő illetve kivehető/ készítéséhez.

A lenyomatozás lépéseiben, a protetikai kiegészítők használatában az egyes fogpótlás-típusok esetében nincs különbség!