

Zártkanalas /indirekt/ lenyomatvételi technika lépései lenyomatvételi sapka segítségével

Indirekt zártkanalas lenyomatvételi módszert akkor alkalmazunk, ha a beültetett implantátumok egymáshoz képest csak kisfokú /maximum 9-10°/ szögeltérést mutatnak.

Elsőorrban részleges, illetve szubtotális foghiányok esetén javasoljuk ezt a lenyomatvételi módszert. A lenyomat készítéséhez A-szilikon vagy poliészter alapanyagú lenyomatvételi anyag használata ajánlott.

Lenyomatvételhez kemény műanyagból készített gyári vagy egyéni kanalakat használunk. Lehetőleg egyszakaszos vagy egyidejű kétszakaszos lenyomatvételi módszert alkalmazunk.

Fázisok lépésről lépésre:

1. lépés: a száj előkészítése lenyomatvételhez

Az implantátum felszabadítása /második műtét/ után 1 hétig a páciens ínyformázót visel, mely biztosítja a periimplantáris gingiva megfelelő formázását. Ez a módszer elsősorban a kétszakaszos műtéti módszerrel beültetett implantátumok esetén javasolt eljárás. Amennyiben egyszakaszos műtéti módszert alkalmazunk, ínyformázásra nincs szükségünk.



2034-641
2034-642



2040-641
2040-642



2045-641
2045-642



2055-641
2055-642



2034-651
2034-652



2040-651
2040-652



2045-651
2045-652



2055-651
2055-652

2. lépés: lenyomatvétel

A periimplantáris gingiva regenerációja után /kb. 7-10 nap/ az ínyformázó/ka/t eltávolítjuk az implantátum/ok/ból és helyére behelyezzük a sapkával történő lenyomatvételre alkalmas műcsonko/ka/t a 725-ös fejrész/eke/t, melye/ke/t az implantátum/ok/ban rögzítő csavarral fixálunk.

Ezután a fejrészekre a megfelelő pozícióba rányomással rögzítjük a lenyomatvételi sapkákat /termékkód: 34724/.



3034-725



3040-725




3045-725



3055-725



34724

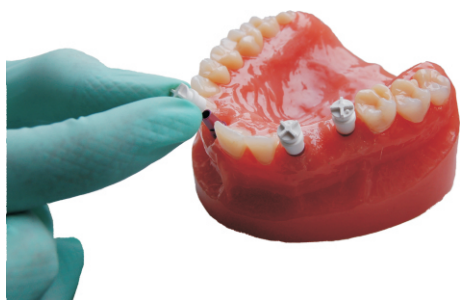

3. lépés

A lenyomatanyaggal megtöltött kanalat a szájba helyezzük.



4. lépés

A lenyomatanyag megkötése után eltávolítjuk a szájból a lenyomatot.

A retencióval ellátott lenyomatvételi sapkák szilárdan rögzülve a lenyomatanyagban maradnak.



5. lépés

Ezután a lenyomatvételi elemeket /fejrészeket/ egyesével kicsavarozzuk az implantátumokból és a megfelelő helyre, a lenyomatanyagban rögzült sapkába enyhe nyomással visszahelyezzük. Ezek után a szájban lévő implantátumokba az ínyformázót vagy transzgingivális gyógyulási csavart visszarögzítjük, ezzel zárjuk az implantátumokat.

Ezután a munkamenet megegyezik a fogorvosi gyakorlatban a fogpótlások készítésekor alkalmazott munkamenettel.

A lenyomatvétel lépései nem függenek a fogpótlás típusától. A lenyomatvételi sapka segítségével végzett lenyomatvételi technika a megfelelő lehet bármilyen implantátumos fogpótlás /cementezéssel, - csavarral rögzülő illetve kivehető/ készítéséhez.

A lenyomatozás lépéseiben, a protetikai kiegészítők használatában az egyes fogpótlás-típusok esetében nincs különbség!